

DIATECH® ShapeGuard

**Strong in Polishing.
Gentle on Surfaces.**

Stark im Polieren.
Sanft zu Oberflächen.




ADVANTAGES AT A GLANCE

VORTEILE IM ÜBERBLICK

**Strong in Polishing.
Gentle on Surfaces.**

Stark im Polieren.
Sanft zu Oberflächen.

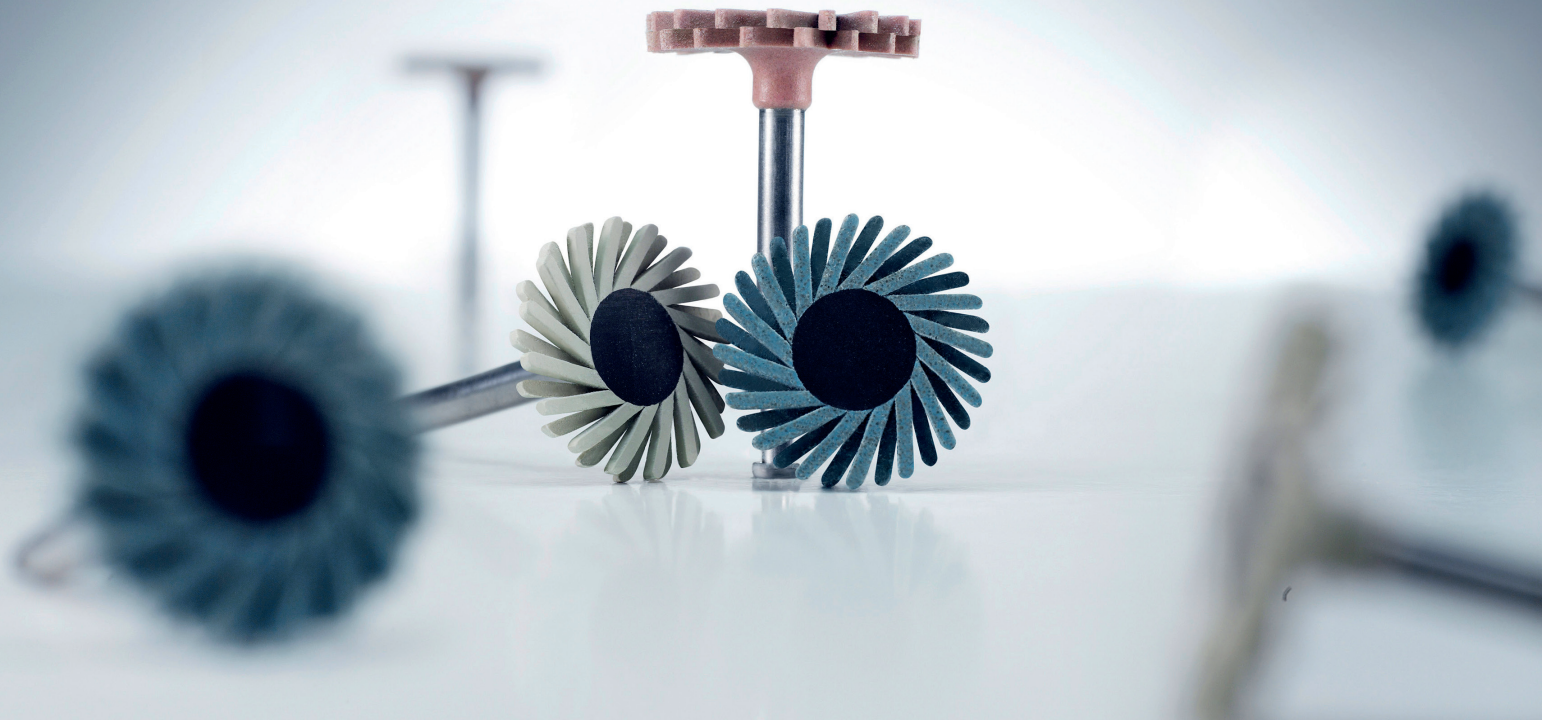

**A perfect complement to existing
DIATECH diamond polishing systems.**

Die perfekte Ergänzung für existierende
DIATECH Diamantpoliersysteme.

- **Adapts** to any surface
 - **Uniform pressure distribution**
due to flexible lamellas
→ Morphology of tooth is preserved
 - **Fast, easy and intuitive**
finishing & polishing
 - **Optimized** polishing systems for
composite, ceramics and zirconia
 - Outstanding **high lustre** polishing results
- Passt sich an jede Oberfläche an
 - Gleichmäßige Druckausübung dank
flexibler Lamellen
→ Morphologie des Zahns bleibt erhalten
 - Schnelles, einfaches und
intuitives Finieren & Polieren
 - Optimierte Poliersysteme für
Komposite, Keramik und Zirkonoxid
 - Hervorragender Glanz




APPLICATION POSSIBILITIES

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

ShapeGuard facilitates intraoral finishing and polishing of the following areas:

- Interproximal
- Occlusal / Okklusal
- Incisal / Inzisal
- Labial
- Buccal / Bukkal
- Lingual

ShapeGuard ermöglicht intraorales Finieren und Polieren der folgenden Bereiche:

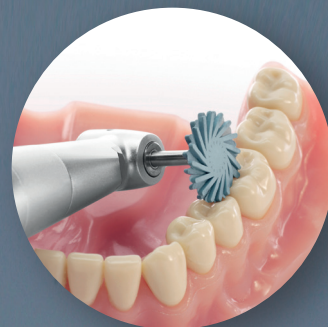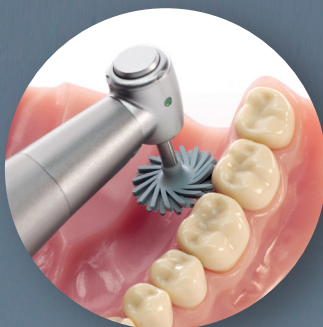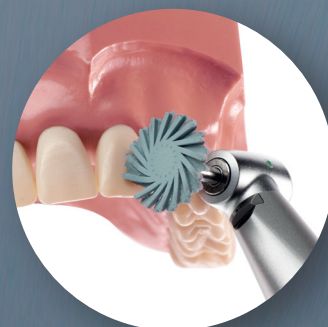


UTILIZATION

Exert minimal, constant pressure.
Use wet when polishing intraorally.

ANWENDUNG

Mit geringem, gleichmäßigem Druck polieren. Im Mund nass anwenden.

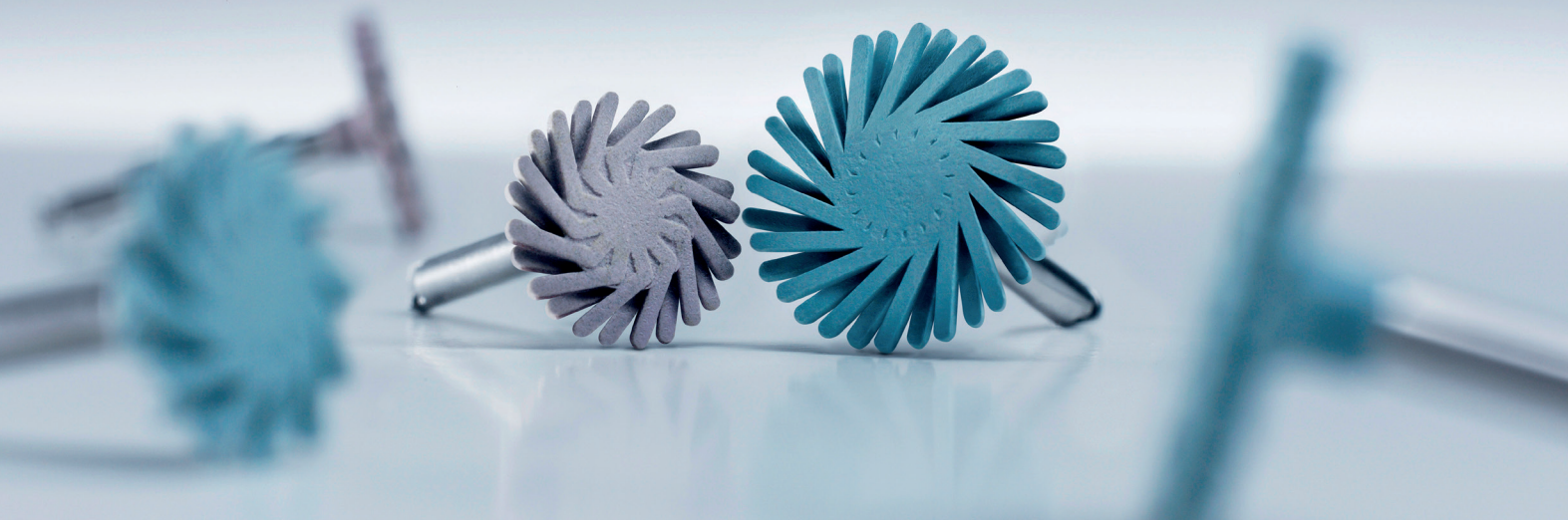


ORDER INFORMATION

BESTELLINFORMATION

ShapeGuard for Composite


Part of the Polishing System: Teil des Poliersystems:
 Comprepol Plus ① / Composhine Plus ②

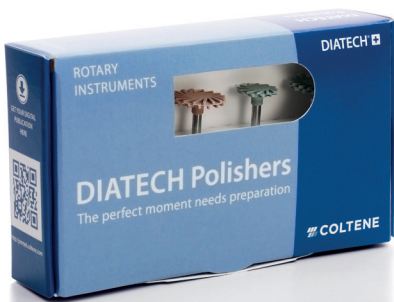

RPM: 10'000 – 12'000

ShapeGuard for Ceramic


Part of the Polishing System: Teil des Poliersystems:
 Cerafin Plus ① / Cerapreshine Plus ② / Cerashine Plus ③

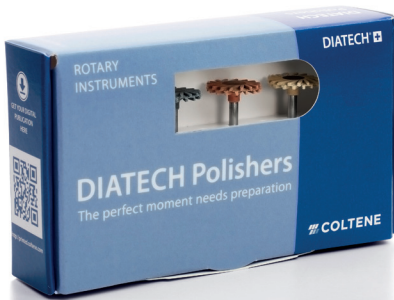

RPM: 10'000 – 12'000

ShapeGuard for Zirconia

Part of the Polishing System: Teil des Poliersystems:
 Zircopol Plus ① / Zircoshine Plus ②

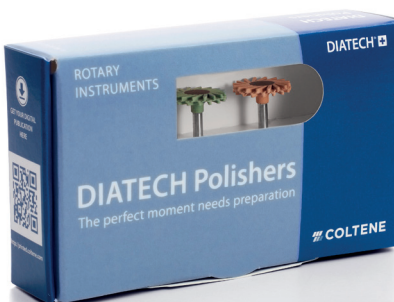

RPM: 10'000 – 12'000

Step ①



Step ②



ISO Ø 1/10 mm	110	140	110	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Polisher type	23SG11RA	23SG14RA	24SG11RA	24SG14RA

RA/ISO 204				
Order No.	60019877	60019878	60019879	60019880
Content	5	5	5	5

60019915 ShapeGuard Composite Trial Pack				
Content	1	1	1	1

Step ①



Step ②



Step ③



ISO Ø 1/10 mm	140	140	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6
Polisher type	93SG14RA	94SG14RA	95SG14RA

RA/ISO 204			
Order No.	60019881	60019882	60019883
Content	5	5	5

60019914 ShapeGuard Ceramic Trial Pack			
Content	1	1	1

Step ①



Step ②



ISO Ø 1/10 mm	140	140
Head L in mm	1.6	1.6
Polisher type	97SG14RA	98SG14RA








RA/ISO 204		
Order No.	60022004	60022005
Content	5	5

60022006 ShapeGuard Zirconia Trial Pack		
Content	1	1

ORDER INFORMATION







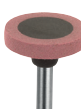

BESTELLINFORMATION

60019916 ShapeGuard Composite Polishing Plus Kit

	①			②		
						
Polisher type	2301RA	2311RA	23SG14RA	2401RA	2411RA	24SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	030	060	140	030	060	140
Head L in mm	7.5	7.5	1.6	7.5	7.5	1.6
Content	1	1	1	1	1	1



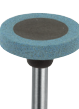






60019917 ShapeGuard Ceramic Polishing Plus Kit

	①			②			
							
Polisher type	9311RA	9331RA	93SG14RA	9401RA	9411RA	9431RA	94SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	060	110	140	030	060	110	140
Head L in mm	7.5	2	1.6	7.5	7.5	2	1.6
Content	1	1	1	1	1	1	1




	③			
				
Polisher type	9501RA	9511RA	9531RA	95SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	030	060	110	140
Head L in mm	7.5	7.5	2	1.6
Content	1	1	1	1

60022020 ShapeGuard Zirconia Polishing Plus Kit

	①			②		
						
Polisher type	9703RA	9711RA	97SG14RA	9803RA	9811RA	98SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	040	060	140	040	060	140
Head L in mm	10	7.5	1.6	10	7.5	1.6
Content	1	1	1	1	1	1



© 2017 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

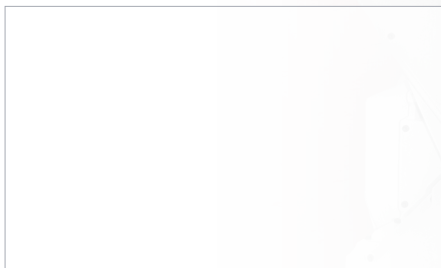

Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, West Sussex
RH15 9NF / UK
T +44 1444 235486
F +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com



DIATECH 
PREMIUM ROTARY INSTRUMENTS

 **COLTENE**